


OKTAGON®

OKTABASE

La nuova basetta da incollaggio in titanio
di MEISINGER Implants

The new Ti-Base by MEISINGER Implants

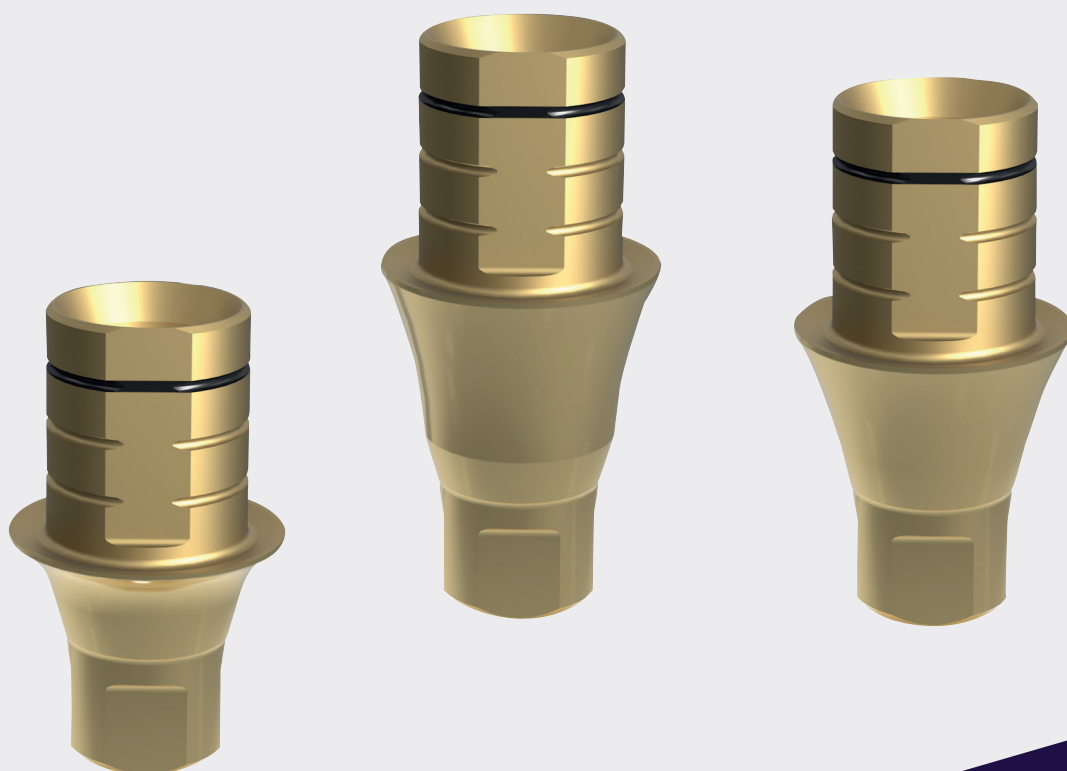

IN SINTESI: AT A GLANCE:

Facilmente personalizzabile:

Se necessario, il camino alto 4 mm può essere accorciato di 1 mm. Una marcatura serve come un aiuto per l'orientamento.

Easily customizable:

If necessary, the 4 mm high chimney can be shortened by 1 mm. A mark serves as a guide for orientation.

Anodizzato oro:

L'anodizzazione color oro consente di ottenere risultati estetici ottimali.

Gold anodized:


The gold-coloured anodization achieves an optimal aesthetic result.

Pratico canale adesivo:

Il canale da incollaggio e la piattaforma conica del Ti-Base sono stati progettati per compensare un leggero eccesso di adesivo e ridurre le perdite e quindi le reazioni indesiderate dei tessuti molli.

Convenient adhesive channel:

The glue channel and conical platform of the Ti-Base has been designed to compensate for slight excess of glue and reduce leakage and thus undesirable soft tissue reactions.

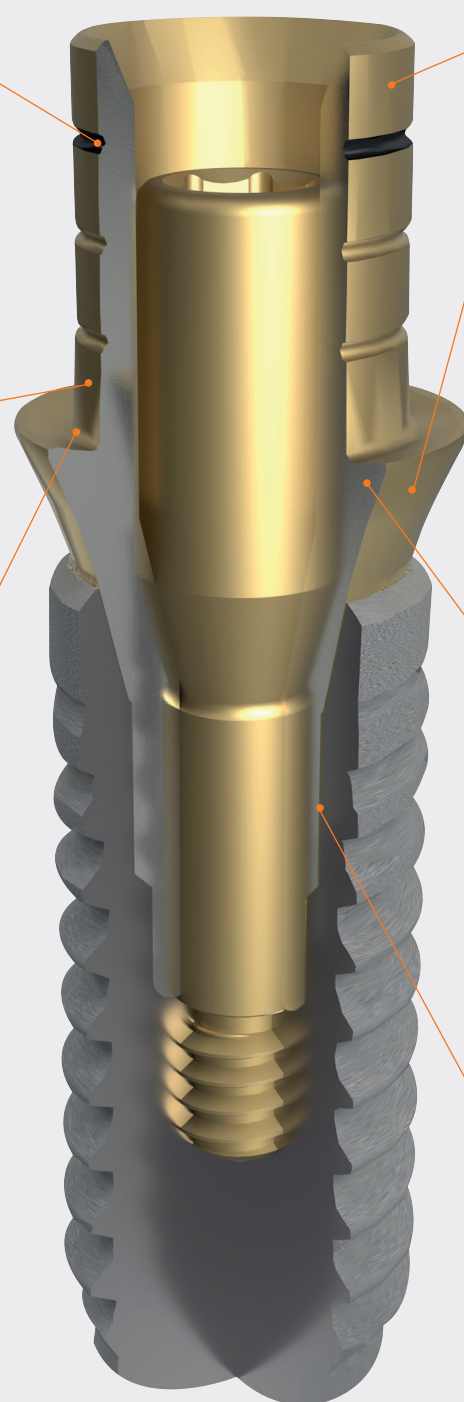

Superfici correttamente abbinare:

La superficie sabbiata favorisce l'adesione dell'adesivo. La protesi si mantiene quindi meglio e non è necessaria un'ulteriore lavorazione in laboratorio.

L'area a contatto con i tessuti molli viene invece lucidata per garantire la migliore interazione possibile proprio con i tessuti molli.

Matched surfaces:

The sandblasted surface promotes good adhesion. Thus, the prosthesis holds better and no further processing in the laboratory is required.

The area in contact with the soft tissue is polished to ensure the best possible interaction with the soft tissue.

Forma sofisticata:

Il profilo leggermente concavo nell'area del tragitto trans mucoso assicura il contatto ideale con la gengiva e, grazie alla superficie lucidata, garantisce un'ottima interazione con i tessuti molli.

Sophisticated shape:

The slightly concave profile in the transition area provides good contact with the gingiva and, together with the polished surface, ensures good soft tissue interaction.

Adattamento perfetto:

Il Ti-Base è al 100% di nostra propria produzione „Made in Germany“ e si adatta perfettamente agli impianti OKTAGON®.

Perfect fit:


The Ti-Base comes 100 % from our own production Made in Germany and fits perfectly on our OKTAGON® implants.

Avvitamento angolato:

Grazie al sofisticato design del Ti-Base, in combinazione con il cacciavite appositamente sviluppato, è possibile avvitare con un angolo fino a 25°, in qualsiasi direzione.

Angulated screwing:

Due to the special shape of the Ti-Base and the specially developed screwdriver, angulated screwing of up to 25° in any direction is possible.

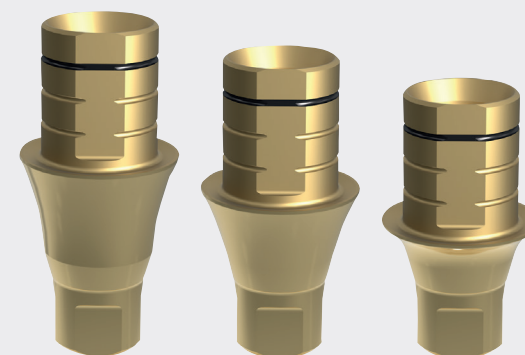

Ti-Base può essere utilizzato solo con i cacciaviti 63979 e 63980!
Ti-Base can only be used with screwdrivers 63979 and 63980!

Pronti per ogni situazione:

Il Ti-Base, nell'opzione Bone Level, è disponibile in diverse altezze gengivali di 1,0, 2,0 e 3,0 mm, inclusa la vite di lunghezza appropriata.

A scelta, con o senza blocco antirotazionale dell'interfaccia implantare, è disponibile per ognuna delle piattaforme OKTAGON® (BL NC/RC, TL RP/VP).

Equipped for every situation:

The Ti-Base is available in gingiva heights of 1.0, 2.0 and 3.0 mm including matching screw lengths.

Optionally with or without rotation lock and available for each of the OKTAGON® platforms (BL NC/RC, TL RP/VP).

Digitale

Il Ti-Base è integrato con i nostri scanbodies nelle librerie exocad, dental wings e 3shape. Per un flusso di lavoro digitale senza soluzione di continuità.

Digital

The Ti-base is integrated together with our scanbodies in the exocad, dental wings and 3shape digital library. For a seamless digital workflow.

Scansiona qui per scaricare le librerie!
Scan here to get to the libraries!



Download EN

exocad

3shape

dental wings

Codice / Figure	Descrizione / Description	Altezza gengivale / Gingivaheight	Bloccato in rotazione / rotation lock
Basi da incollaggio in Titanio / Titanium adhesive base			
57100	BL NC Ti-Base GH1 non rotante / BL NC Ti-Base GH1 engaging	1.0 mm	✓
57101	BL NC Ti-Base GH2 non rotante / BL NC Ti-Base GH2 engaging	2.0 mm	✓
57102	BL NC Ti-Base GH3 non rotante / BL NC Ti-Base GH3 engaging	3.0 mm	✓
57103	BL NC Ti-Base GH1 / BL NC Ti-Base GH1	1.0 mm	–
57104	BL NC Ti-Base GH2 / BL NC Ti-Base GH2	2.0 mm	–
57105	BL NC Ti-Base GH3 / BL NC Ti-Base GH3	3.0 mm	–
57106	BL RC Ti-Base GH1 non rotante / BL RC Ti-Base GH1 engaging	1.0 mm	✓
57107	BL RC Ti-Base GH2 non rotante / BL RC Ti-Base GH2 engaging	2.0 mm	✓
57108	BL RC Ti-Base GH3 non rotante / BL RC Ti-Base GH3 engaging	3.0 mm	✓
57109	BL RC Ti-Base GH1 / BL RC Ti-Base GH1	1.0 mm	–
57110	BL RC Ti-Base GH2 / BL RC Ti-Base GH2	2.0 mm	–
57111	BL RC Ti-Base GH3 / BL RC Ti-Base GH3	3.0 mm	–
57112	TL RP Ti-Base non rotante / TL RP Ti-Base engaging	–	✓
57113	TL RP Ti-Base / TL RP Ti-Base	–	–
57114	TL WP Ti-Base non rotante / TL WP Ti-Base engaging	–	✓
57115	TL WP Ti-Base / TL WP Ti-Base	–	–
Viti / Screws			
57200	Vite per BL Ti-Base GH1 / Screw for BL Ti-Base GH1	Per 1.0 mm GH Ti-Base / For 1.0 mm GH Ti-Base	
57201	Vite per BL Ti-Base GH2 / Screw for BL Ti-Base GH2	Per 2.0 mm GH Ti-Base / For 2.0 mm GH Ti-Base	
57202	Vite per BL Ti-Base GH3 / Screw for BL Ti-Base GH3	Per 3.0 mm GH Ti-Base / For 3.0 mm GH Ti-Base	
57203	Vite per TL Ti-Base / Screw for TL Ti-Base	–	
Accessori / Accessories			
63979 *	AS Cacciavite Ti-Base RA / AS Screwdriver Ti-Base RA	–	
63980 *	AS Cacciavite Ti-Base / AS Screwdriver Ti-Base	–	
Cappette di modellazione / Burnout caps			
31188	BL NC Ti-Base Cappetta 0° / BL NC Ti-Base Cap 0°	–	
31177	BL NC Ti-Base Cappetta 10° / BL NC Ti-Base Cap 10°	–	
31178	BL NC Ti-Base Cappetta 20° / BL NC Ti-Base Cap 20°	–	
31179	BL RC Ti-Base Cappetta 0° / BL RC Ti-Base Cap 0°	–	
31180	BL RC Ti-Base Cappetta 10° / BL RC Ti-Base Cap 10°	–	
31181	BL RC Ti-Base Cappetta 20° / BL RC Ti-Base Cap 20°	–	
31182	TL RP Ti-Base Cappetta 0° / TL RP Ti-Base Cap 0°	–	
31183	TL RP Ti-Base Cappetta 10° / TL RP Ti-Base Cap 10°	–	
31184	TL RP Ti-Base Cappetta 20° / TL RP Ti-Base Cap 20°	–	
31185	TL WP Ti-Base Cappetta 0° / TL WP Ti-Base Cap 0°	–	
31186	TL WP Ti-Base Cappetta 10° / TL WP Ti-Base Cap 10°	–	
31187	TL WP Ti-Base Cappetta 20° / TL WP Ti-Base Cap 20°	–	
Corpi di scansione / Scanbodies (**PEEK)			
12100 (11100**)	Corpo di scansione TL RP Titanio / Scanbody TL RP Titan	–	
12200 (11200**)	Corpo di scansione TL WP Titanio / Scanbody TL WP Titan	–	
12300 (11300**)	Corpo di scansione BL NC Titanio / Scanbody BL NC Titan	–	
12400 (11400**)	Corpo di scansione BL RC Titanio / Scanbody BL RC Titan	–	
Analoghi per stampa 3D / Analog for printed models			
21100	Analogo TL RP DIM / Analog TL RP DIM	–	
21200	Analogo TL WP DIM / Analog TL WP DIM	–	
21300	Analogo BL NC DIM / Analog BL NC DIM	–	
21400	Analogo BL RC DIM / Analog BL RC DIM	–	

* I componenti Ti-Base possono essere utilizzati solo in combinazione con l'articolo 63979/63980 AS!
 * Ti-Base components only to be used in conjunction with article 63979/63980 AS screwdriver!

